



❄️ Cryothérapie

⊕ Compressive

🏠 À domicile



Attelle épaule

avec coussin d'abduction et manchon

ORIGINAL
BREVETÉ

Notice d'utilisation



**You
Tube**



Ce flash code vous permet de visionner
la vidéo de mise en place de l'attelle d'épaule Igloo® :
<https://youtu.be/lxOiBstFoR8>

CONTRE-INDICATIONS

(avis médical obligatoire avant utilisation)

- Troubles de la sensibilité cutanée
- Insensibilité au froid
- Allergie au froid
- Syndrome de Raynaud
- Cryoglobulinémie
- Artérite
- Polyarthrite
- Diabète

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le pack de gel ne doit pas être mis en contact direct avec la peau.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas percer la tubulure, le pack de gel ou l'attelle.
- Ne pas chauffer le pack de gel.
- Ne pas ingérer le gel.
- En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
- Ne peut être utilisé en cas de dégradation.
- En cas de doute sur l'utilisation du dispositif, contacter un professionnel de santé.

Les dispositifs IGLOO® ne requièrent pas de conditions particulières de stockage, de manutention et d'élimination.



Laver régulièrement le dispositif médical.

Laver à la main, à l'eau tiède, avec un savon doux. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de détergent.
Ne pas immerger l'attelle.



Ne pas laver ni sécher en machine.



Faire sécher suspendu.
Ne pas sécher près d'une source de chaleur.



Ne pas repasser.



Conforme aux exigences de l'Union Européenne.



Fabricant.



Mise au rebut en déchetterie.



Référence.



Numéro de lot.



Code LPP.



Date limite d'utilisation.




Usage multiple pour un seul patient.



Mise en garde.

COMPOSITION DU SET

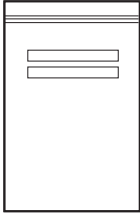


sac de congélation




pack de gel




tissu de protection

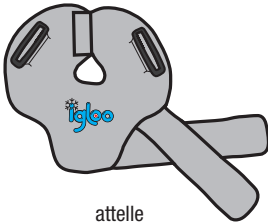


attelle

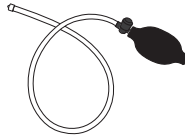


pompe et tubulure

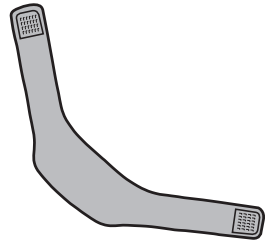

bande latérale

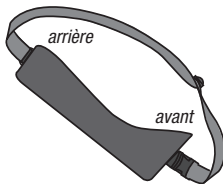

coussin d'abduction

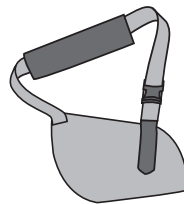

manchon et sangle



auto-agrippant




pince auto-agrippante

AVERTISSEMENT


CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE UTILISÉ SUIVANT LES INSTRUCTIONS D'UN PRATICIEN DÛMENT HABILITÉ (CHIRURGIEN, MÉDECIN, KINÉSITHÉRAPEUTE, PHARMACIEN...).

PRINCIPE DE MISE EN PLACE

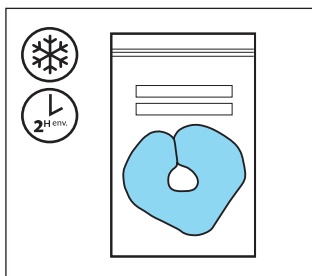

1/ Placer le pack de gel bleu (sans l'attelle ni la pompe), dans le sac de congélation, pendant environ 2 heures* au congélateur. À la sortie du congélateur, le pack doit être souple (sinon, laisser le pack à température ambiante le temps qu'il s'assouplisse).


**selon votre congélateur*

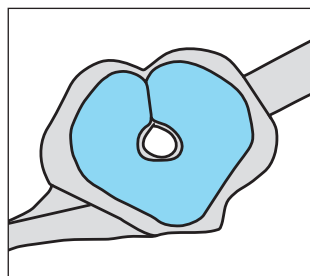

2/ Disposer le pack de gel dans l'attelle.

AVANT DE POSITIONNER L'ATELLE SUR L'ÉPAULE,
Poser l'attelle côté logo Igloo® dessus.

Placer la bande latérale sur l'attache de l'attelle.

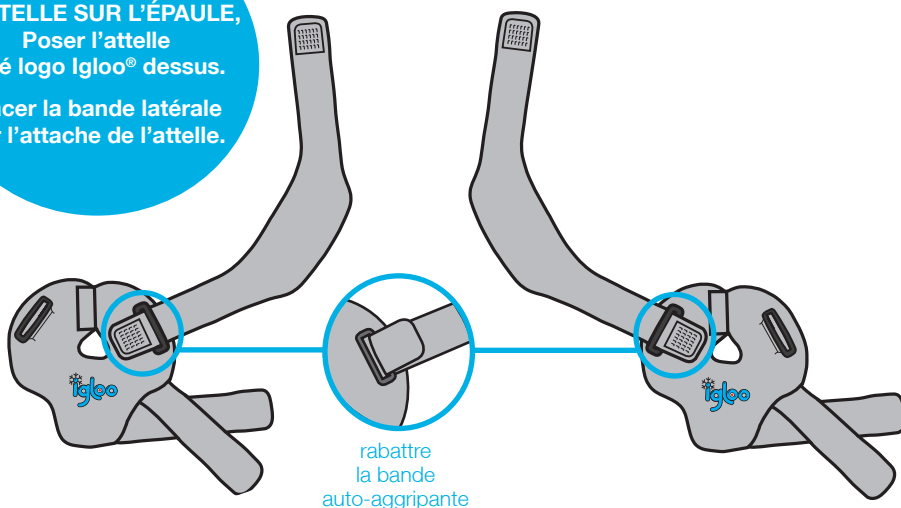


**MONTAGE POUR
ÉPAULE GAUCHE**




**MONTAGE POUR
ÉPAULE DROITE**

Ce dispositif est indiqué pour l'épaule.
Il se positionne sur l'épaule gauche comme sur la droite.


PRINCIPE DE MISE EN PLACE

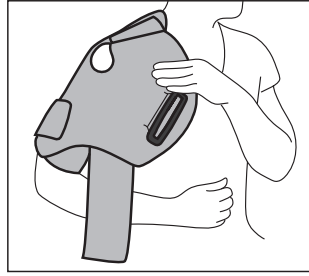

3/ Le pack de gel ne doit pas être en contact direct avec la peau. Mettre un tee-shirt ou le tissu de protection. Poser l'attelle sur l'épaule et fixer les bandes autour du bras.

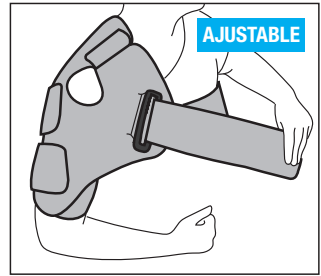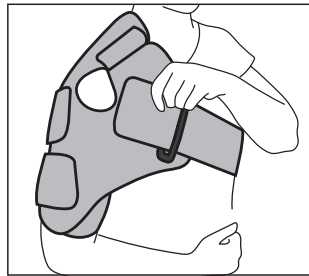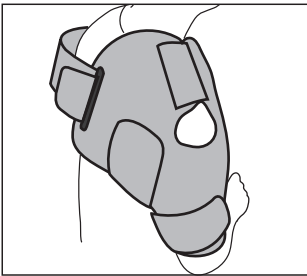


4/ Passer la bande latérale, que vous avez précédemment fixé à l'attelle, autour du torse, en la passant sous le bras. Fixer l'extrémité à l'attache de l'attelle, au niveau de la poitrine, et rabattre la bande. Ajuster la taille grâce au système de bande auto-agrippante.

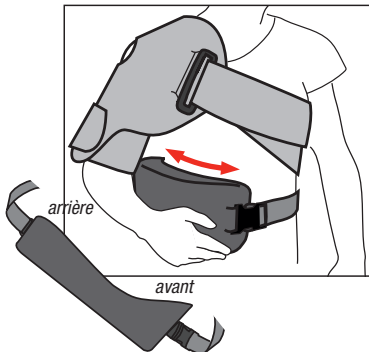


5/ Placer le coussin et sa sangle autour de la taille. Positionner le coussin sur l'intérieur de l'avant-bras au niveau du coude*. (La courbe du coussin doit épouser la courbe du corps).

* Le coussin est réversible gauche ou droite, la partie pointue doit être placée devant.

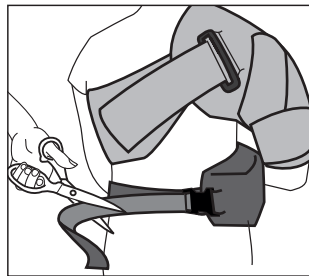


6/ Ajuster la sangle autour de votre taille et couper l'excédent de sangle.

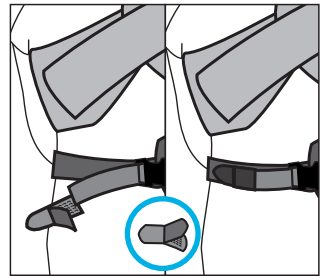


7/ Attacher la pince auto-agrippante sur l'extrémité de la sangle et rabattre la pince sur la bande.


PRINCIPE DE MISE EN PLACE

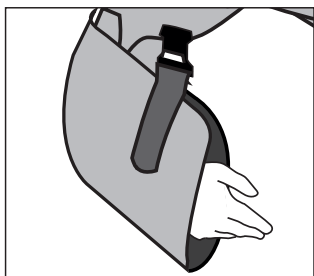


8/ Glisser le bras dans le manchon.

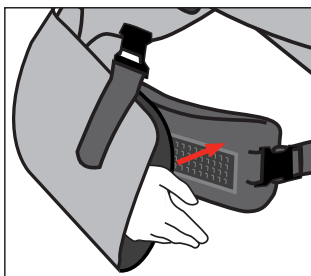


9/ Agripper le manchon au coussin à l'aide de l'auto-agrippant.

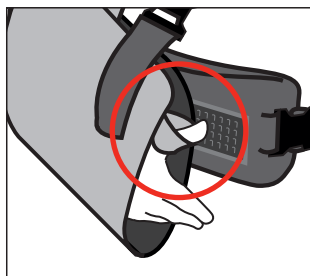


10/ Introduire le pouce dans la boucle intérieure du manchon.

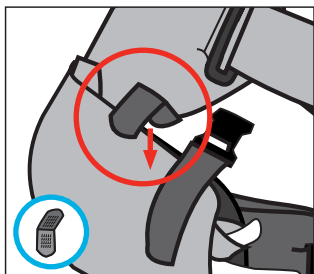


11/ Fermer l'ouverture au-dessus du manchon à l'aide de l'auto-agrippant.

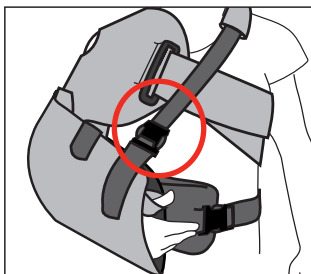


12/ Attacher la sangle du manchon sur la fixation avant.

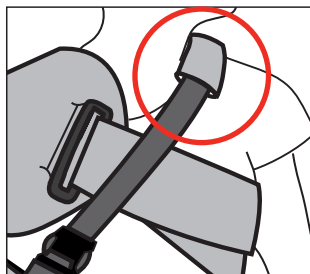


13/ Ajuster la protection sur la sangle au niveau du cou.

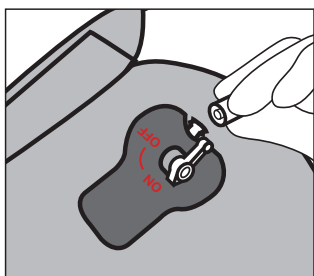


14/ Visser la pompe de l'attelle sur le robinet en position ON.

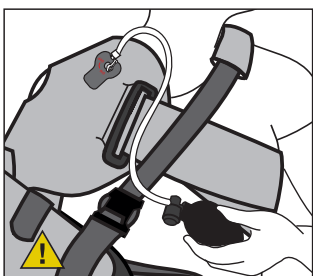

15/ Exercer 10 à 15 pressions. Le réglage de la pression se fait à l'aide de la pompe.

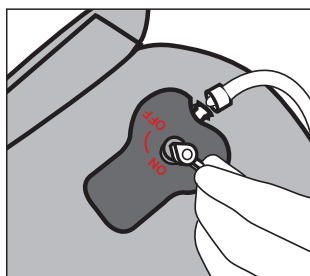

16/ Fermer le robinet en position OFF.

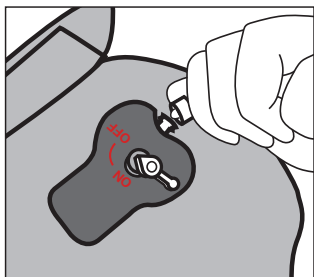

17/ Dévisser la pompe.

A la fin de la séance, retirer le pack de gel par l'ouverture au-dessus, afin de conserver les réglages de l'attelle.

Après utilisation, dégonfler l'attelle (position du robinet sur ON).

⚠ La compression ne doit pas être excessive et doit rester confortable. En cas de sensation de fourmillement, dégonfler légèrement l'attelle à l'aide du petit bouton situé sous la pompe, robinet en position ON.

La durée de la séance est fonction des instructions du praticien. Préconisée pour 20 min, 3 à 4 fois par jour.

⚠ Utilisation en continu déconseillée.



1 rue Jules Guesde - 91130 RIS-ORANGIS
Tél. +33 (0)1 69 02 19 20 - Fax +33 (0)1 69 23 30 79

www.orthopedie-iso.fr